

Produktdatenblatt

BCL® -Denta-Plac-AZ

Ultraschall-Zahnsteinlöser

Stand: 31.12.2020 * Druck: 10.05.2022

BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER ZAHNSTEINLÖSER
AUF SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS
ZUM ENTFERNEN VON
ZAHNSTEINABLAGERUNGEN
(PLAC-SCHICHTEN) AN ZAHNPROTHESEN
ZUM EINSATZ IN/BEI
ZAHNTECHNISCHEN LABORATORIEN,
ZAHNARZTPRAXEN,
ZAHNPROTHESENTRAGENDEN PATIENTEN

ANWENDUNG

EINSATZ IM
ULTRASCHALLBAD/POLIERNADELBAD

EINWIRKZEIT BEI ALTEN STARKEN
SCHICHTEN BIS 1 STUNDE

EINSATZ DURCH EINLEGEN IN DIE LÖSUNG
IN DIE HEISSE ANWENDUNGSLÖSUNG
MINDESTENS 2 STUNDEN ODER ÜBER NACHT
EINLEGEN

KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL, ALUMINIUM
OHNE TEST UND BERATUNG



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/?produkt=3581



ACHTUNG

VERURSACHT HAUTREIZUNGEN. VERURSACHT SCHWERE AUGENREIZUNG.
SCHUTZHANDSCHUHE / AUGENSCHUTZ / GESICHTSSCHUTZ TRAGEN. BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: EINIGE MINUTEN LANG BEHUTSAM MIT WASSER
SPÜLEN. VORHANDENE KONTAKTLINSEN NACH MÖGLICHKEIT ENTFERNEN.
WEITER SPÜLEN. BEI ANHALTENDER AUGENREIZUNG: ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN
/ ÄRZTLICHE HILFE HINZUZIEHEN.

Produktnr: 3581

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste +
Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Shop's> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel:+49(0)9434-20.398.0
Fax:+49(0)9434-20.398.29
eMail: info@bcl-ag.de